

# MEDICAL ICE

GHIACCIO ISTANTANEO BUSTA

GHIACCIO ISTANTANEO

IN BUSTE MONOUSO TNT

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE IIA

SCHEDA TECNICA 03-08-2018

## DESCRIZIONE

**MEDICAL ICE** è una pratica busta in TNT in grado di fornire immediatamente ed in modo autonomo basse temperature, in tutti quei casi in cui si necessita una pronta applicazione del "freddo".

## CARATTERISTICHE

**Busta esterna** in TNT con tre termosaldature in modo da garantire la resistenza, la termosaldabilità e l'impermeabilità. TNT: triaccoppiato.

Il TNT è creato per proteggere le zone più sensibili dalla sensazione di freddo eccessivo. Busta in TNT coperta da brevetto.

**Bolla d'acqua interna** realizzata in materiale biaccoppiato in modo da rompersi esercitando una leggera pressione con le dita, antiurto. Coperta da brevetto.

**Contenuto:** urea, cloruro d'ammonio e acqua.

**Formato busta:** cm 8x13, 14x18, 14x24, tolleranza +/-5%



## INDICAZIONI E MODALITA' D'USO

La busta di **MEDICAL ICE** può essere efficacemente utilizzata per sostituire l'applicazione di ghiaccio o di acqua fredda. In caso di traumi, l'immediata applicazione di **MEDICAL ICE** allevia il dolore e determina il rapido raffreddamento della parte contrastandone la sintomatologia (ematomi, gonfiore, piccole emorragie).

Destinazioni d'uso:

- ☞ Settore ospedaliero: odontoiatria (dopo estrazioni dentali o altri interventi chirurgici del cavo orale), ortopedia e traumatologia, chirurgia, cardiologia radiologia (RX terapia, cobalto terapia)
- ☞ Settore sportivo e domestico: distorsioni, contusioni, traumi, ipertermie, colpi di calore.

Modalità d'uso:

- 1- Afferrare la busta dal bordo in alto e far scendere verso il basso il contenuto della busta;
- 2- Premere con forza verso il centro fino a rompere la bolla contenente la soluzione refrigerante;
- 3- Agitare bene per favorire la dissoluzione del contenuto nel liquido reattivo.
- 4- Grazie alla miscela ottenuta, la temperatura raggiunge -4 °C ed arriva a 0°C in circa 20 minuti.

## AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA

NON SONO IDENTIFICABILI PERICOLI PER LA SALUTE IN CASO DI NORMALI CONDIZIONI DI MANIPOLAZIONE.

Consigli di prudenza per le persone:

INALAZIONE	nessun rischio nelle normali condizioni di utilizzo
CONTATTO CON LA PELLE	nessun rischio nelle normali condizioni di utilizzo
CONTATTO CON GLI OCCHI	nessun rischio nelle normali condizioni di utilizzo
INGESTIONE DEL CONTENUTO	consultare il medico
INALAZIONE DEL CONTENUTO	respirare aria fresca
CONTATTO CON IL CONTENUTO	sciogliere con acqua fresca
CONTATTO CON GLI OCCHI	chiudere gli occhi per evitare di ferirsi con gli angoli del sacchetto

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille.



SIMBOLOGIA SECONDO NORMA EUROPEA

UNI CEI EN ISO 15223

## CONFEZIONE

Cartone da 25 buste

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione, riportata sul retro della busta

Lotto: indicato sul retro della busta

**USO ESTERNO-USO PROFESSIONALE**



CLASSE: IIA "CE"

Dispositivo Medico Classe IIA

Classificazione in base all'allegato IX paragrafo III regola 9 della Direttiva Europea 93/42/CEE e successive modifiche (inclusa la Direttiva 2007/47/CE)

**LHAMEDICS**  
PROFESSIONAL  
naturalmenteigiene

Lombarda H S.r.l. Unipersonale - Amministrazione: Loc.Faustina - 20080 Albairate (MI) Tel. +39-02-94920509 Fax +39-02-94920515

Cod. Fisc.e Num. Reg. Imprese di Mi 09734150155 - R.E.A. MI 1313132

Sede legale: Via Volterra 9 - 20146 Milano – Cap.Soc. € 102.260,00 P.IVA IT09734150155

Commerciale: Via Francesco Luigi Ferrari, 22/B/C - 44122 Ferrara Tel. +39-0532-978497 Fax +39-0532-909233

<http://www.amedics.eu> – [commerciale@amedics.eu](mailto:commerciale@amedics.eu)