

# GHIACCIO SPRAY

## GHIACCIO SINTETICO ISTANTANEO SPRAY

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE IIA - Classificazione in base all'allegato IX paragrafo III regola 9 della Direttiva Europea 93/42/CEE e successive modifiche (inclusa la Direttiva 2007/47/CE)

SCHEDA TECNICA 03-08-2018

### DESCRIZIONE

**ICE SPRAY** può essere efficacemente utilizzato per sostituire l'applicazione di ghiaccio o di acqua fredda.

In caso di traumi, l'immediata applicazione di **ICE SPRAY** allevia il dolore e determina il rapido raffreddamento della parte, contrastandone efficacemente le conseguenze (ematomi, gonfiore, piccole emorragie).

Il prodotto non contiene medicinali e/o costituenti di medicinali derivati da sangue umano.



### INDICAZIONI E MODALITA' D'USO

**ICE SPRAY** dona immediato sollievo.

Le destinazioni d'uso sono:

- **Settore ospedaliero:** odontoiatria (dopo estrazioni dentali o altri interventi chirurgici del cavo orale), ortopedia e traumatologia, chirurgia, cardiologia radiologia (RX terapia, cobalto terapia)
- **Settore sportivo (calcio, rugby, ciclismo, palestra) e domestico:** distorsioni, contusioni, traumi, ipertermie, colpi di calore.

#### MODALITA' D'USO

1. Applicare il prodotto dirigendo, da una distanza di 20 cm, il getto dell'aerosol per circa 3-5 secondi, sulla parte da trattare.
2. A seconda della necessità, ripetere l'operazione 2/3 volte, a distanza di qualche minuto una dall'altra, ad evitare un eccessivo raffreddamento della parte.
3. Non applicare su cute lesa ed evitare il contatto con gli occhi e le mucose.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingredienti:

- Butano, isobutano, propano, mentolo

LATEX FREE

SIMBOLOGIA: simbologia secondo norma europea ENI CEI EN ISO 15223

STOCCAGGIO: conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille.

### CONFEZIONI

24 bombole spray da 400 ml

**USO ESTERNO-USO PROFESSIONALE**

SCADENZA: 5 anni dalla data di produzione. Viene riportata sulla cupola della bomboletta.

**LHAMEDICS**  
PROFESSIONAL  
naturalmenteigiene

Lombarda H S.r.l. Unipersonale - Amministrazione: Loc. Faustina - 20080 Albairate (MI) Tel. +39-02-94920509 Fax +39-02-94920515

Cod. Fisc. e Num. Reg. Imprese di Mi 09734150155 - R.E.A. MI 1313132

Sede legale: Via Volterra 9 - 20146 Milano - Cap.Soc. € 102.260,00 P.IVA IT09734150155

Commerciale: Via Francesco Luigi Ferrari, 22/B/C - 44122 Ferrara Tel. +39-0532-978497 Fax +39-0532-909233

<http://www.amedics.eu> - [commerciale@amedics.eu](mailto:commerciale@amedics.eu)